

# Guide de démarrage rapide



Figure 1 – Affichage du Provizio™ SEM Scanner


## 1 DÉMARRAGE



Allumez le Provizio™ SEM Scanner en le retirant du centre de charge ou en appuyant sur la touche d'action jusqu'à ce que l'écran s'allume et que l'écran de démarrage s'affiche (Figure 2). Ne touchez pas la tête du capteur (Figure 1) pendant ce temps.



Figure 2 – Écran Device Splash (Démarrage de l'appareil)

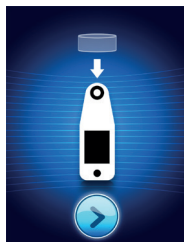

Après environ 4 secondes, l'écran Install Sensor (Installation du capteur) (Figure 3) s'affiche.

Figure 3 – Écran Install Sensor (Installation du capteur)



Figure 4 – Installation du Capteur de Provizio™ SEM Scanner

Retirez le capteur à usage unique Provizio™ SEM Scanner de son emballage et placez-le sur la tête de capteur (Figure 4). Vous entendrez un « clic » lorsque le capteur sera placé correctement. Remarque : chaque session de balayage d'un patient nécessite un nouveau capteur.



Appuyez sur le bouton Next Screen (Écran suivant) pour continuer, l'appareil testera l'installation du capteur, puis affichera l'écran Mode of Operation (Mode de fonctionnement) (Figure 5).

## 2 MODE DE FONCTIONNEMENT



Sélectionnez l'une des trois options disponibles (Figure 5).

Figure 5 – Écran Mode of Operation (Mode de fonctionnement)

a



Appuyez sur le bouton Barcode (codes-barres) pour exécuter le chargement complet des données. Utilisez ce mode si le patient possède un bracelet à codes-barres et si le logiciel de passerelle est installé sur le réseau Wi-Fi. Positionnez l'appareil sur le code-barre et l'appareil l'identifiera automatiquement.

b



Appuyez sur le bouton Manual Charting (Cartographie manuelle) pour exécuter le mode de fonctionnement manuel. Pour les cas où le patient n'a pas de bracelet à codes-barres ou si le logiciel de passerelle n'est pas installé sur votre réseau Wi-Fi.

c



Appuyez sur le bouton Manual Patient ID (Identification manuelle du patient) dans le coin inférieur droit pour vous permettre de saisir manuellement l'ID du patient via un clavier sur l'écran d'affichage de l'appareil.



Une fois la sélection effectuée, l'appareil passera automatiquement à l'écran Select Body Location (Sélectionner l'emplacement du corps) (Figure 6).

Figure 6 – Écran Body Location (Emplacement du corps)

## 3 BALAYAGE



Sélectionnez la zone du corps que vous souhaitez balayer (sacrum, talon gauche ou talon droit) en appuyant sur le bouton Select (Sélectionner).

a

Assurez-vous que la région de peau à examiner est exempte d'humidité superficielle ou de toute substance.

b

Appliquez la tête du capteur à plat contre la peau du patient sur la zone à balayer avec une pression suffisante jusqu'à ce que le balayage se déclenche.

c

Lorsqu'une lecture réussie est prise, l'appareil clignote en bleu et émet une courte tonalité audio.

d

Enlevez le capteur de la peau. Les cercles de session sous l'emplacement du corps seront complètement remplis lorsque la mesure sera terminée (Figure 1).

e

Répétez les étapes ci-dessus pour obtenir un ensemble complet de lectures.

f

Le symbole  $\Delta$  affichera une valeur après 3 lectures.

g

$\Delta \geq 0,6$  peut suggérer un risque accru de PI/PU (blessures par pression/plaies de pression). La valeur doit être examinée conjointement avec le jugement clinique.

h



Appuyez sur le bouton Return (Retour) pour revenir à l'écran Body Location (Emplacement du corps) et répétez le processus de balayage pour les autres zones du corps.

## 4 RÉINITIALISATION



Une fois que tous les emplacements du corps sont terminés et que les valeurs delta sont acceptables (Figure 7), appuyez sur le bouton Home (Accueil) pour revenir à l'écran Install Sensor (Installation du capteur) (Figure 3). L'appareil enregistrera et stockera toutes les lectures prises.

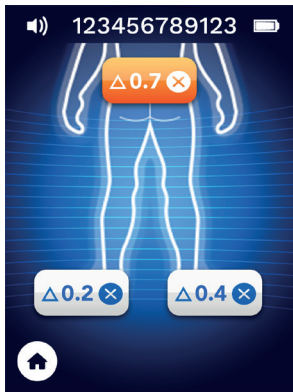


Figure 7 – Écran Body Location (Emplacement du corps) (balayages effectués)

Retirez le capteur en tirant doucement le capteur du connecteur.

Installez un nouveau capteur si vous balayez un autre patient.

## 5 TÉLÉCHARGEMENT DES DONNÉES

Pour télécharger les lectures prises, placez le Provizio™ SEM Scanner dans le centre de charge (Figure 8), l'appareil démarre des communications sans fil et se connecte au serveur de passerelle ; toutes les sessions de données stockées sont téléchargées dans les dossiers des patients et supprimées de l'appareil.



Figure 8 – Centre de charge Provizio™

## 6 CHARGEMENT ET MISE HORS TENSION

Pour charger, placez l'appareil dans le centre de charge (Figure 8). Le voyant du centre commencera à clignoter en vert. Lorsque l'appareil est dans le centre de charge, l'écran tactile est désactivé et l'écran affiche l'état du téléchargement des données et du niveau de charge de la batterie (Figure 9). L'appareil est complètement chargé lorsque cinq barres vertes sont allumées.



Figure 9 – Écran Charging (Charge)



Pour éteindre l'appareil, appuyez sur la touche d'action et maintenez-la enfoncée.

## 7 NETTOYAGE



**Nettoyez et désinfectez le Provizio™ SEM Scanner en suivant la procédure de nettoyage et de désinfection dans le mode d'emploi.**