

Guide de démarrage rapide

ID du patient
Indicateur d'état

Delta SEM

Touche d'action

Capteur

Scanner de codes-
barres patient

Indicateur du niveau
de batterie

Valeur SEM

Station de charge

Figure 1 – SEM Scanner Provizio^{MD} et station de charge

1

DÉMARRAGE



Figure 2 – Écran de démarrage

Allumez le SEM Scanner Provizio^{MD} en le retirant de la station de charge ou en appuyant sur la touche d'action jusqu'à ce que l'écran s'allume et que l'écran de démarrage s'affiche (Figure 2). La tête du capteur (Figure 1) doit rester intacte pendant ce temps.



Figure 3 – Scanner à tête fixe intégré

a Capteur à tête fixe intégré

Si vous utilisez le SEM Scanner Provizio à capteur à tête fixe intégré, après environ 4 secondes, l'écran Mode of Operation (Mode de fonctionnement) (Figure 6) s'affiche.



Figure 5 – Installation du capteur de SEM Scanner Provizio

b Scanner à capteur à usage unique

Si vous utilisez le SEM Scanner Provizio à capteur à usage unique, après environ 4 secondes, l'écran Install Sensor (Installation du capteur) (Figure 4) s'affiche.

Figure 4 – Écran Install Sensor (Installation du capteur)

Retirez le capteur à usage unique SEM Scanner Provizio de son emballage et placez-le sur la tête de capteur (Figure 5). Vous entendrez un « clic » lorsque le capteur sera placé correctement. Note : chaque session de balayage d'un patient nécessite un nouveau capteur.



Appuyez sur le bouton Next Screen (Écran suivant) pour continuer, le scanner testera l'installation du capteur, puis affichera l'écran Mode of Operation (Mode de fonctionnement) (Figure 6).

2

MODE DE FONCTIONNEMENT



Sélectionnez l'une des quatre options disponibles (Figure 6).

Figure 6 – Écran Mode of Operation (Mode de fonctionnement)

a



Appuyez sur le bouton Barcode (Code-barres) pour exécuter le chargement complet des données. Utilisez ce mode si le patient possède un bracelet à code-barres et si le tableau de bord du portail du SEM Scanner Provizio est installé sur votre réseau Wi-Fi.



Figure 7 – Écran Barcode Scanning (Lecture de codes-barres)



Figure 8 – Lecture d'un code-barres patient

Appuyez sur le bouton Barcode (Code-barres) sur l'écran Barcode Scanning (Lecture de codes-barres) (Figure 7)

Positionnez le scanner et utilisez la lumière verte pour aligner le code-barres du patient avec le lecteur de codes-barres (Figure 8).

Une fois que le scanner a identifié le code-barres, il émet une courte tonalité et l'écran de sélection de la partie du corps s'affiche (Figure 9).

S'il n'est pas possible de lire le code-barres, appuyez sur la touche d'identification manuelle du patient (Option c) dans le coin inférieur droit pour saisir manuellement l'ID du patient

b



Appuyez sur le bouton Manual Charting (Cartographie manuelle) pour exécuter le mode de fonctionnement manuel. Pour les cas où le patient n'a pas de bracelet à codes-barres ou si le tableau de bord du portail n'est pas installé sur votre réseau Wi-Fi

c



Appuyez sur le bouton Manual Patient ID (Identification manuelle du patient) dans le coin inférieur droit pour vous permettre de saisir manuellement l'ID du patient via un clavier sur l'écran d'affichage du scanner.

d



Appuyez sur la touche de formation dans le coin inférieur gauche pour exécuter un mode de test pour la formation uniquement.



Figure 9 – Écran Body Location Selection (Sélection de la partie du corps)

Une fois la sélection effectuée (a-d), le scanner passe automatiquement à l'écran Body Location Selection (Sélection de la partie du corps) (Figure 9).

Guide de démarrage rapide

3 BALAYAGE



Sélectionnez la zone du corps que vous souhaitez balayer (sacrum, talon gauche ou talon droit) en appuyant sur le bouton Select (Sélectionner).

- Assurez-vous que la région de peau à examiner est exempte d'humidité superficielle ou de toute substance.
- Appliquez la tête du capteur à plat contre la peau du patient sur la zone à balayer avec une pression suffisante jusqu'à ce que le balayage se déclenche.
- Lorsqu'une lecture réussie est effectuée, le scanner clignote en bleu et émet un court son.
- Enlevez le capteur de la peau. Les cercles de session sous l'emplacement du corps seront complètement remplis lorsque la mesure sera terminée (Figure 1).
- Répétez les étapes ci-dessus pour obtenir un ensemble complet de lectures.
- Le symbole Δ affichera une valeur après 3 lectures.
- $\Delta > 0,6$ peut suggérer un risque accru de PI/PU (blessures par pression/plaies de pression). La valeur doit être examinée conjointement avec le jugement clinique.
- Appuyez sur le bouton Body Location Selection Screen (Écran de sélection de la partie du corps) pour revenir à l'écran correspondant et répétez le processus de balayage pour les autres zones du corps.

4 RÉINITIALISATION



Une fois que tous les emplacements du corps sont terminés et que les valeurs delta sont acceptables (Figure 10), appuyez sur le bouton Home (Accueil) pour revenir à l'écran Install Sensor (Installation du capteur) (Figure 4) si vous utilisez le scanner à capteur à usage unique.

Si vous utilisez le scanner à capteur à tête fixe, appuyez sur le bouton Home (Accueil) pour revenir à l'écran Mode of Operation (Mode de fonctionnement) (Figure 6).

Le scanner enregistrera et stockera ensuite toutes les lectures prises sous forme chiffrée jusqu'à leur chargement sur le tableau de bord du portail.

Si vous utilisez l'option de charge manuelle, les lectures SEM sont supprimées une fois la session de balayage terminée.

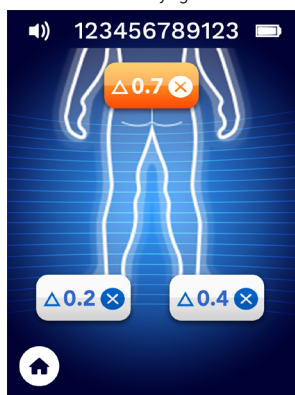


Figure 10 – Écran Body Location Selection (Sélection de la partie du corps) (balayages effectués)

Si vous utilisez le scanner à capteur à usage unique, retirez le capteur en le tirant délicatement du connecteur du capteur.



Figure 11 – Retrait du capteur du SEM Scanner Provizio

5 NETTOYAGE



Nettoyez et désinfectez le SEM Scanner Provizio en suivant la procédure de nettoyage et de désinfection dans le mode d'emploi, disponible à l'adresse suivante :

<https://sem-scanner.com/product/user-guides>

Si vous utilisez le scanner à capteur à usage unique, installez un nouveau capteur si vous balayez un autre patient.

6 TÉLÉVERSEMENT DES DONNÉES



Figure 12 – Station de charge du SEM Scanner Provizio

Pour charger les lectures prises, placez le SEM Scanner Provizio dans la station de charge (Figure 12). Le scanner initie des communications sans fil et se connecte au tableau de bord du portail. Toutes les sessions de données stockées et chiffrées sont chargées sur le tableau de bord du portail et supprimées du scanner.

7 CHARGEMENT ET MISE HORS TENSION



Figure 13 – Écran Charging (Chargement)

Pour charger le scanner, placez-le dans la station de charge (Figure 12). Le voyant de la station de charge clignote en vert. Lorsque l'appareil est dans la station de charge, l'écran tactile est désactivé et l'affichage indique l'état du chargement des données et le niveau de charge de la batterie (Figure 13).

Le scanner est complètement chargé lorsque cinq barres vertes sont allumées.



Pour éteindre le scanner, appuyez sur la touche d'action et maintenez-la enfoncée.