

Guia de início rápido

ID do paciente
Indicador de estado

SEM Delta

Botão de ação

Sensor

Leitor de código de barras do paciente

Medidor de carga da bateria

Valor SEM

Centro de carregamento

Figura 1 - Scanner Provizio® SEM e Centro de carregamento

1 ARRANQUE



Figura 2 - Ecrã inicial

Pode ligar o scanner Provizio® SEM retirando-o do centro de carregamento ou premindo o botão Ação até o ecrã ficar iluminado e ser mostrado o ecrã inicial (Figura 2). Não deve tocar na cabeça do sensor (Figura 1) durante este período.



Figura 3 - Scanner de cabeça fixa integrada

a Sensor de cabeça fixa integrada

Se estiver a utilizar o scanner Provizio SEM de cabeça fixa integrada, após aproximadamente 4 segundos, será apresentado o ecrã do Modo de Funcionamento (Figura 6).



Figura 4 - Ecrã Instalação do sensor

b Scanner com sensor de utilização única

Se estiver a utilizar o scanner Provizio SEM com sensor de utilização única, após aproximadamente 4 segundos será apresentado o ecrã Instalação do sensor (Figura 4).



Figura 5 - Instalação do sensor do scanner Provizio™ SEM

Retire o sensor de utilização única do scanner Provizio™ SEM da respetiva embalagem e coloque na cabeça do sensor (Figura 5). Irá ouvir um clique quando o sensor for colocado corretamente. Nota - cada sessão de exame do paciente requer um novo sensor.



Pressione o botão Ecrã seguinte para continuar. O scanner irá testar a instalação do sensor e, depois, mostrar o ecrã Modo de funcionamento (Figura 6).

2 MODO DE FUNCIONAMENTO



Selecione uma das quatro opções disponíveis (Figura 6).

Figura 6 - Ecrã Modo de funcionamento

a



Premir o botão Código de barras irá implementar o carregamento completo dos dados. Utilize este modo se o paciente tiver uma pulseira com código de barras e o Gateway do scanner Provizio SEM. O painel de controlo está instalado na sua rede WiFi



Figura 7 - Ecrã Leitura de código de barras



Figura 8 - Leitura do código de barras de um paciente

Pressione o botão do código de barras no ecrã Leitura de código de barras (Figura 7)

Posicione o scanner e utilize a luz verde do leitor de código de barras apontando-a para o código de barras do paciente. (Figura 8)

Assim que o scanner tenha identificado o código de barras, emitirá um sinal sonoro curto e será apresentado o ecrã de seleção de Localização corporal. (Figura 9)

Se não for possível ler o código de barras, pressionar o botão de ID manual do paciente (Opção C) no canto inferior direito permitirá que insira manualmente a ID do paciente.

b



Premir o botão Mapeamento manual irá implementar o modo de funcionamento manual. Para quando o paciente não tem uma pulseira com código de barras ou não tiver o Painel de controlo do Gateway instalado na sua rede Wi-Fi

c



Premir o botão ID manual do paciente no canto inferior direito irá permitir-lhe introduzir manualmente a ID do paciente através de um teclado no ecrã do scanner

d



Premir o botão Treino no canto inferior esquerdo irá implementar um modo de teste apenas para treino



Figura 9 - Ecrã de seleção da localização corporal

Depois de fazer a seleção (a-d), o scanner move-se automaticamente para o ecrã de seleção Localização corporal (Figura 9)

3 EXAME



Selecione a área do corpo que pretende examinar; sacro, calcanhar esquerdo ou direito, premindo o botão Selecionar.

- Certifique-se de que a área de pele que está a ser avaliada não apresenta qualquer tipo de humidade ou matéria na sua superfície
- Aplique a cabeça do sensor contra a pele do paciente na área a ser examinada, com pressão suficiente, até o exame ser iniciado
- Quando for conseguida uma leitura bem-sucedida, o scanner irá piscar a azul e emitir um breve sinal sonoro
- Levante o sensor afastando-o da pele. Os círculos da sessão sob a localização corporal estarão completamente preenchidos quando a medição estiver concluída. (Figura 1)
- Repita os passos acima para obter um conjunto completo de leituras
- O símbolo Δ irá apresentar um valor após a realização de 3 leituras
- $\Delta \geq 0,6$ pode sugerir um maior risco de PI/PU. O valor deve ser considerado em conjunto com a avaliação clínica
- Pressione o botão de seleção da Localização corporal e repita o processo de exame para as restantes áreas do corpo

4 REINICIAR



Quando todas as localizações do corpo estiverem concluídas e os valores delta forem aceitáveis (Figura 10), carregue no botão Início para regressar ao ecrã Instalação do sensor (Figura 4).

Ou o botão Início para voltar ao ecrã Modo de funcionamento (Figura 6) - se estiver a utilizar o scanner de cabeça fixa integrada.

O scanner guardará e armazenará todas as leituras realizadas em formato encriptado até que sejam carregadas no painel de controlo do Gateway.

Se estiver a utilizar a opção de Carregamento manual, as leituras do SEM são eliminadas assim que sair da sessão de exame.

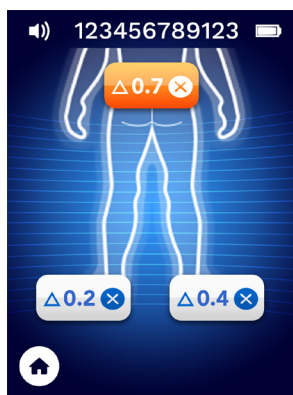


Figura 10 – Ecrã de seleção da Localização corporal (exames concluídos)

Se estiver a utilizar o scanner com sensor de utilização única, retire o sensor puxando-o com cuidado para fora do conector do sensor.



Figura 11 - Remoção do sensor do scanner Provizio SEM

5 LIMPAR



Limpe e desinfete o scanner Provizio SEM após o procedimento de limpeza e desinfecção no Manual do Utilizador, que pode ser encontrado em:

<https://sem-scanner.com/product/user-guides>

Se estiver a utilizar o scanner com o sensor de utilização única, instale um novo sensor se for examinar outro paciente.

6 CARREGAMENTO DE DADOS



Para carregar as leituras realizadas, coloque o scanner Provizio SEM no centro de carregamento (Figura 12), o scanner inicia as comunicações sem fios e faz a ligação ao Painel de controlo do Gateway. Todas as sessões de dados armazenadas e encriptadas são eliminadas do scanner.

Figura 12 - Centro de carregamento do scanner Provizio SEM

7 CARREGAR E DESLIGAR



Figura 13 – Ecrã de carregamento

Para carregar o scanner, coloque-o no centro de carregamento (Figura 12). A luz do centro de carregamento começa a piscar a verde. Enquanto o dispositivo estiver no centro de carregamento, o ecrã tátil está desativado, o ecrã mostra o estado do carregamento de dados e o nível de carga da bateria (Figura 13).

O scanner está totalmente carregado quando estiverem acesas cinco barras verdes.



Para desligar o scanner, mantenha premido o botão de Ação.