

# Guia de início rápido



Figura 1 - Scanner Provizio® SEM e Centro de carregamento

## 1 ARRANQUE



Figura 2 - Tela inicial

Pode ligar o scanner Provizio® SEM retirando-o do centro de carregamento ou premindo o botão Ação até o ecrã ficar iluminado e ser mostrado o ecrã inicial (Figura 2). Não deve tocar na cabeça do sensor (Figura 1) durante este período.



Figura 3 - Scanner de cabeça fixa integrada

### a Sensor de cabeça fixa integrada

Se estiver a utilizar o scanner Provizio SEM de cabeça fixa integrada, após aproximadamente 4 segundos, será apresentado o ecrã do Modo de Funcionamento (Figura 6).

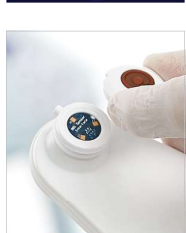


Figura 5 - Instalação do sensor do scanner Provizio™ SEM

### b Scanner com sensor de utilização única

Se estiver a utilizar o scanner Provizio SEM com sensor de utilização única, após aproximadamente 4 segundos será apresentado o ecrã Instalação do sensor (Figura 4).

Figura 4 - Tela Instalação do sensor

Retire o sensor de utilização única do scanner Provizio™ SEM da respetiva embalagem e coloque na cabeça do sensor (Figura 5). Irá ouvir um clique quando o sensor for colocado corretamente. Nota - cada sessão de exame do paciente requer um novo sensor.



Pressione o botão Ecrã seguinte para continuar. O scanner irá testar a instalação do sensor e, depois, mostrar o ecrã Modo de funcionamento (Figura 6).

## 2 MODO DE FUNCIONAMENTO



Selecione uma das quatro opções disponíveis (Figura 6).

Figura 6 - Tela Modo de funcionamento

a



Pressionar o botão Código de barras irá implementar o carregamento completo dos dados. Utilize este modo se o paciente tiver uma pulseira com código de barras e o Gateway do scanner Provizio SEM. O painel de controlo está instalado na sua rede WiFi



Figura 7 - Tela Leitura de código de barras



Figura 8 - Leitura do código de barras de um paciente

Pressione o botão do código de barras no ecrã Leitura de código de barras (Figura 7)

Posicione o scanner e utilize a luz verde do leitor de código de barras apontando-a para o código de barras do paciente. (Figura 8)

Assim que o scanner tenha identificado o código de barras, emitirá um sinal sonoro curto e será apresentado o ecrã de seleção de Localização corporal. (Figura 9)

Se não for possível ler o código de barras, pressionar o botão de ID manual do paciente (Opção C) no canto inferior direito permitirá que insira manualmente a ID do paciente.

b



Pressionar o botão Mapeamento manual irá implementar o modo de funcionamento manual. Para quando o paciente não tem uma pulseira com código de barras ou não tiver o Painel de controlo do Gateway instalado na sua rede Wi-Fi

c



Pressionar o botão ID manual do paciente no canto inferior direito irá permitir-lhe introduzir manualmente a ID do paciente através de um teclado no ecrã do scanner

d



Pressionar o botão Treino no canto inferior esquerdo irá implementar um modo de teste apenas para treino



Figura 9 - Tela de seleção da localização corporal

Depois de fazer a seleção (a-d), o scanner move-se automaticamente para o ecrã de seleção Localização corporal (Figura 9)

## 3 EXAME



Selecione a área do corpo que pretende examinar; sacro, calcanhar esquerdo ou direito, premindo o botão Selecionar.

a Certifique-se de que a área de pele que está a ser avaliada não apresenta qualquer tipo de humidade ou matéria na sua superfície

b Aplique a cabeça do sensor contra a pele do paciente na área a ser examinada, com pressão suficiente, até o exame ser iniciado

c Quando for conseguida uma leitura bem-sucedida, o scanner irá piscar a azul e emitir um breve sinal sonoro

d Levante o sensor afastando-o da pele. Os círculos da sessão sob a localização corporal estarão completamente preenchidos quando a medição estiver concluída. (Figura 1)

e Repita os passos acima para obter um conjunto completo de leituras

f O símbolo  $\Delta$  irá apresentar um valor após a realização de 3 leituras

g  $\Delta \geq 0,6$  pode sugerir um maior risco de PI/PU. O valor deve ser considerado em conjunto com a avaliação clínica



h Pressione o botão de seleção da Localização corporal e repita o processo de exame para as restantes áreas do corpo

## 4 REINICIAR



Quando todas as localizações do corpo estiverem concluídas e os valores delta forem aceitáveis (Figura 10), carregue no botão Início para regressar ao ecrã Instalação do sensor (Figura 4).

Ou o botão Início para voltar ao ecrã Modo de funcionamento (Figura 6) - se estiver a utilizar o scanner de cabeça fixa integrada.

O scanner guardará e armazenará todas as leituras realizadas em formato encriptado até que sejam carregadas no painel de controlo do Gateway.

Se estiver a utilizar a opção de Carregamento manual, as leituras do SEM são eliminadas assim que sair da sessão de exame.

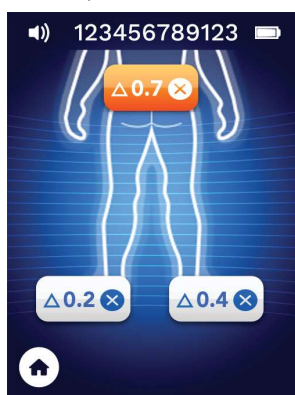


Figura 10 – Ecrã de seleção da Localização corporal (exames concluídos)

Se estiver a utilizar o scanner com sensor de utilização única, retire o sensor puxando-o com cuidado para fora do conector do sensor.



Figura 11 - Remoção do sensor do scanner Provizio SEM

## 5 LIMPAR



Limpe e desinfete o scanner Provizio SEM após o procedimento de limpeza e desinfecção no Manual do Utilizador, que pode ser encontrado em:

<https://sem-scanner.com/product/user-guides>

Se estiver a utilizar o scanner com o sensor de utilização única, instale um novo sensor se for examinar outro paciente.

## 6 CARREGAMENTO DE DADOS



Para carregar as leituras realizadas, coloque o scanner Provizio SEM no centro de carregamento (Figura 12), o scanner inicia as comunicações sem fios e faz a ligação ao Painel de controlo do Gateway. Todas as sessões de dados armazenadas e encriptadas são eliminadas do scanner.

Figura 12 - Centro de carregamento do scanner Provizio SEM

## 7 CARREGAR E DESLIGAR



Figura 13 – Ecrã de carregamento

Para carregar o scanner, coloque-o no centro de carregamento (Figura 12). A luz do centro de carregamento começa a piscar a verde. Enquanto o dispositivo estiver no centro de carregamento, o ecrã tátil está desativado, o ecrã mostra o estado do carregamento de dados e o nível de carga da bateria (Figura 13).

O scanner está totalmente carregado quando estiverem acesas cinco barras verdes.



Para desligar o scanner, mantenha premido o botão de Ação.