

Snelstartgids



Afbeelding 1 – scherm van Provizio™ SEM Scanner


1 OPSTARTEN



Schakel de Provizio™ SEM Scanner in door deze van de oplaadmat te nemen of door op de actiekноп te drukken totdat het scherm oplicht en het laadscherm wordt weergegeven (afbeelding 2). De sensorkop (afbeelding 1) moet gedurende deze tijd onaangeraakt blijven.



Afbeelding 2 – laadscherm van apparaat

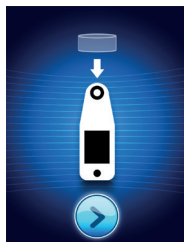

Na ongeveer 4 seconden verschijnt het scherm Sensor installeren [Install Sensor] (afbeelding 3).

Afbeelding 3 – scherm Sensor installeren



Afbeelding 4 – Provizio™ SEM Scanner-sensor installeren

Haal de Provizio™ SEM Scanner-sensor (voor eenmalig gebruik!) uit de verpakking en plaats deze op de sensorkop (afbeelding 4). U hoort een klik wanneer de sensor correct is geplaatst. Let op: elke scansessie per patiënt vereist een nieuwe sensor.



Druk op de knop Volgend scherm [Next Screen] om door te gaan, het apparaat zal de installatie van de sensor testen en vervolgens het scherm Bedieningsmodus [Mode of Operation] weergeven (afbeelding 5).

2 BEDIENINGSMODUS



Selecteer een van de drie beschikbare opties (afbeelding 5).

Figuur 5 – scherm Bedieningsmodus

a



Door op de Barcode-kноп te drukken, wordt de volledige gegevensupload uitgevoerd. Gebruik deze modus als de patiënt een polsband met barcode heeft en de gateway-software op uw WiFi-netwerk is geïnstalleerd. Plaats het apparaat boven de streepjescode en het apparaat herkent deze automatisch.

b




Door op de knop Handmatig identificeren [Manual Charting] te drukken wordt de handmatige bedieningsmodus ingeschakeld. Dit voor het geval dat de patiënt geen polsband met streepjescode heeft of dat de Gateway-software niet op uw WiFi-netwerk is geïnstalleerd.

c



Door op de knop Handmatige patiënt-ID [Manual Patient ID] in de rechteronderhoek te drukken, kunt u de patiënt-ID handmatig invoeren via een toetsenbord op het apparaatscherm.

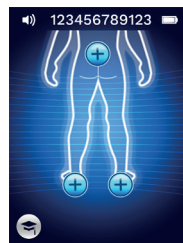

Nadat de selectie is gemaakt, gaat het apparaat automatisch naar het scherm Lichaamsgebied [Body Location] (afbeelding 6).

Figuur 6 – Scherm Lichaamsgebied

3 SCANNEN



Selecteer het lichaamsgebied dat u wilt scannen (heiligbeen, linker- of rechterhiel) door op de Selectie-kноп [Selection] te drukken.

a

Zorg ervoor dat er zich geen vocht of vuil bevindt op de plek waar de huid wordt beoordeeld.

b

Plaats de sensorkop plat en met voldoende druk tegen de huid van de patiënt in het te scannen gebied, totdat de scan wordt geactiveerd.

c

Wanneer er een meting is uitgevoerd, knippert het apparaat blauw en geeft het een kort geluidssignaal af.

d

Til de sensor van de huid. De sessiecircels onder het lichaamsgebied worden volledig ingevuld wanneer de meting is voltooid (afbeelding 1).

e

Herhaal bovenstaande stappen om een complete metingenreeks te verkrijgen.

f

Het Δ-symbool geeft een waarde weer nadat er 3 metingen zijn verricht.

g

$A \geq 0,6$ kan wijzen op een verhoogd risico op PI/PU. De waarde moet worden beschouwd in de context van een bredere klinische beoordeling.

h




Druk op de Terug-kноп [Return] om terug te keren naar het scherm Lichaamsgebied en herhaal het scanproces voor de resterende lichaamsgebieden.

4 RESETTEN



Zodra alle lichaamslocaties gemeten zijn en de deltawaarden acceptabel zijn (afbeelding 7), drukt u op de Start-knop [Home] om terug te keren naar het scherm Sensor installeren (afbeelding 3). Het apparaat slaat alle uitgevoerde metingen op.

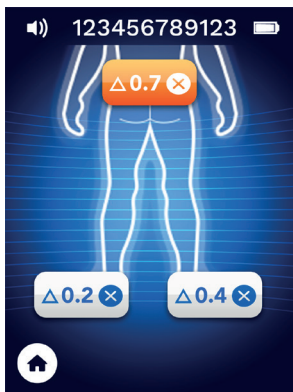

Afbeelding 7 – scherm Lichaamslocatie (scans voltooid)

Verwijder de sensor door deze voorzichtig uit de aansluiting te trekken.

Installeer een nieuwe sensor als u een andere patiënt gaat scannen.

5 GEGEVENS UPLOADEN



Afbeelding 8 – Provizio™-oplaadmat

Om meetresultaten te uploaden, plaatst u de Provizio™ SEM Scanner op de oplaadmat (afbeelding 8). Het apparaat start dan een draadloze communicatie en maakt verbinding met de gateway-server. Alle opgeslagen gegevenssessies worden geüpload naar de patiëntendossiers en verwijderd van het apparaat.

6 OPLADEN EN UITSCHAKELEN

Plaats het apparaat op de oplaadmat om het op te laden (afbeelding 8). Het lampje op de mat begint groen te knipperen. Terwijl het apparaat zich op de oplaadmat bevindt, is het touchscreen uitgeschakeld en toont het scherm de status van de gegevensupload en het batterijlaadniveau (afbeelding 9). Het apparaat is volledig opgeladen wanneer vijf groene balken verlicht zijn.



Afbeelding 9 – oplaadscherm



De scanner kan worden uitgeschakeld door de actieknop ingedrukt te houden.

7 SCHOON WERKEN



Reinig en desinfecteer de Provizio™ SEM-scanner volgens de reinigings- en desinfectieprocedure in de gebruiksaanwijzing.